

FEMURBÜRSTE

zur Anwendung im chirurgischen und orthopädischen Bereich
Art.-Nr. MSTBT04-PO

mst
medical service team

www.mst-gmbh.eu

D Produktbeschreibung:

Die Femurbürste ist entwickelt worden, um Granulationsgewebe, Knorpel, Knochen und Zementfragmente zu entfernen. Somit ist eine saubere Oberfläche gewährleistet, um eine gute Fixation zwischen Knochen und Interface zu erzielen.

Die Femurbürste ist steril verpackt und wird in Boxen zu 10 Stück geliefert. (1VE=10 Stück)

Spezifikationen:

- Steife Polyesterbürste zum Reinigen des Markkanals
- spiralförmig zur effizienten Entfernung von Gewebe und Fragmenten
- Kunststoffummantelung zur Schonung des umliegenden Gewebes und der Handschuhe
- Einmalartikel zur Senkung des Infektionsrisikos
- Manuell und maschinell einsetzbar

Abmessungen:

Gesamtlänge:	280 mm
Länge Bürstenkopf:	110 mm
Ø Bürstenkopf:	20 mm
Ø Handstück/Kunststoffummantelung:	8 mm
Ø Anschluss maschinell/manuell:	6,5 mm

Anwendung:

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Femurbürste.
2. Die Femurbürste kann in das Jakobsfutter eines Handgriffes wie auch in allen anderen chirurgischen Maschinen eingespannt und verwendet werden.
3. Nach Gebrauch bitte sachgerecht entsorgen.

Bitte beachten Sie:

Dieser Artikel darf nur von einem Arzt angewendet werden.



Warnung:

- Bitte benutzen Sie keinen Artikel, der bereits geöffnet oder dessen Verpackung beschädigt ist.
- Der Artikel darf nicht wieder aufbereitet werden.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Nichtbeachtung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Artikel müssen direkt vom Anwender dem Hersteller, sowie der zuständigen Behörde seines Mitgliedstaates gemeldet werden!



Labeling Symbols

	Refer to instruction manual/booklet
	General warning sign / Caution
	Do not use if package is damaged
	Do not re-use
	Keep dry
	Storage temperature range
	Sterilized using ethylene oxide
	Catalog number
	Batch code
	Complies with EU directives
	Manufacturer
	Authorized Representative in the European Community
	Swiss Authorized Representative
	UK Responsible Person
	Use by date
	Medical Device

