

# KOAXIALER KANALBÜRSTENAUFSATZ

Zubehör MST-Jetlavage  
Art.-Nr. MSTBT04-Z

mst  
medical service team

www.mst-gmbh.eu

## D Produktbeschreibung:

Die Koaxialbürste ist als Zubehör zur MST-JetLavage (MST2500Z-BB, MST2500Z-AC und MST2500Z-ACB) entwickelt worden, um während der Hüftendoprothetik den Markkanal zu reinigen.

Einmalartikel zur Senkung des Infektionsrisikos.

Die Femurbürste ist steril verpackt und wird in Boxen zu 10 Stück geliefert (1 VE=10 Stück).

## Spezifikationen:

<b>Gesamtlänge:</b>	310 mm
<b>Länge Bürstenkopf/ PVC (Polyvinylchlorid):</b>	76 mm
<b>Ø Bürstenkopf/ PVC (Polyvinylchlorid):</b>	16 mm
<b>Bürstenansatzstück/ PC (Polycarbonat)</b>	

## Anwendung:

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Koaxialbürste.
2. Setzen Sie das Ende des Bürstenansatzes auf das JetLavage Handstück bis es sicher eingerastet ist.
3. Nach Gebrauch bitte sachgerecht entsorgen.

## Entsorgung:

Der Artikel ist nach allen gängigen nationalen und internationalen Entsorgungsrichtlinien zu entsorgen.



### Bitte beachten Sie:

- Dieser Artikel darf nur von einem Arzt angewendet werden.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Methode und nicht für andere Zwecke!
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen!

### Warnung:

- Bitte benutzen Sie keinen Artikel, der bereits geöffnet oder dessen Verpackung beschädigt ist.
- Der Artikel darf nicht wieder aufbereitet werden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.  
Nichtbeachtung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

### Labeling Symbols

	General warning sign / Caution
	Do not use if package is damaged
	Do not re-use
	Keep dry
	Storage temperature range
	Sterilized using ethylene oxide
	Complies with EU directives
	Not made with latex
	Manufacturer
	Authorized Representative in the European Community
	Swiss Authorized Representative
	UK Responsible Person
	Use by date
	Date of manufacture
	Consult instructions for use
	Medical Device
	Catalog number
	Batch code

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Artikel müssen direkt vom Anwender dem Hersteller, sowie der zuständigen Behörde seines Mitgliedstaates gemeldet werden!

Vertrieb durch:  
mst medical-service gmbh  
eichkampredder 9, 24217 schönberg  
Telefon: +49 4344 818 36-20  
Telefax: +49 4344 818 36-29  
E-Mail: info@mst-gmbh.eu

Dongguan Kaiser Technology Co., LTD.  
No. 6, 2nd Road, Sanjiang Industrial Block,  
Hengli Town, Dongguan City,  
523462 Guangdong, P.R. China

MedNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10,  
48163 Muenster  
Germany

MediMap Ltd.  
2 The Drift, Suffolk,  
Thurston, IP31 3RT  
United Kingdom

miCUTec AG  
Chamerstr 172  
6300 Zug  
Switzerland